



Medicinski pripomoček za zdravljenje ustnih poškodb

SESTAVA:

- Sestavine:** oljčno olje z dodanim kisikom
- Neaktivne sestavine:** eterično olje mete (Mentha Arvensis Oil)

OPIS IZDELKA - NOVOX DROP je medicinski pripomoček za zdravljenje razjed in ustne sluznice, ki pospeši postopek celjenja, saj s svojim filmogenim in zaščitnim delovanjem varuje kožo pred patogeni. **NOVOX Drop** je oljnati gel v brizgi z enim odmerkom, z nepredušnim zamaškom v hermetično zaprtem in neizbrisno označenem ovoju iz večplastnega polietilena

NAVODILA - Medicinske pripomočke NOVOX DROP se pod zdravniškim nadzorom lahko uporablja za zdravljenje:

- peridontitisa,
- poškodb dlesni in neba po kirurških posegih,
- obkoreninskih poškodb,
- ulcerozno-nekrotičnega akutnega vnetja dlesni,
- heilitisa ter poškodb ustne in ustnične sluznice.

KONTRAINDIKACIJE - SREDSTVA NOVOX DROP ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na sredstvo ali na njegove sestavine.

NAVODILA ZA UPORABO - Uporaba sredstva NOVOX DROP je namenjena predvsem zdravstvenim delavcem z znanjem o zdravilih. Z enostavnim usposabljanjem in rednim nadzorom s strani zdravstvenih delavcev ga lahko uporabljajo tudi osebe brez specifičnega znanja.

Pred uporabo in po njej si dobro umijte roke, med nanašanjem sredstva pa uporabljajte rokavice za enkratno uporabo.

Medicinski pripomoček NOVOX DROP lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z drugimi oblogami, ki se ne oprijemljejo podlage oziroma po presoji zdravnika.

Morebitna okužba rane ne pomeni kontraindikacije za uporabo sredstev NOVOX DROP.


Za uporabo v zobozdravstvu in pri ustnih poškodbah


- Neposredno pred uporabo sredstva snemite zamašek z brizge, tako da ga močno povlečete in rahlo zavrtite, da se lažje sprost.
- Sredstvo nanesite na poškodbo, tako da po možnosti sega preko prizadetega predela.
- Sredstvo nanašajte enkrat ali večkrat dnevno največ 30 dni, odvisno od zahtevnosti poškodbe. Priporoča se najmanj 7 dnevno zdravljenje.
- Zaužitje manjših količin izdelka ne predstavlja nikakršnega tveganja za zdravje.









OPOZORILA - Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. Izdelek vsebuje en odmerek, odprte embalaže ne shranjujte za poznejšo uporabo, tudi če ste porabili le del sredstva, saj v primeru ponovne uporabe ni mogoče izključiti tveganja okužbe rane. Sredstva ne uporabljajte za zdravljenje več kot enega bolnika: pri uporabi na več bolnikih ni mogoče izključiti prenosa patogenov. Sredstva ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža odprta ali poškodovana. Sredstva ne uporabljajte v kombinaciji z zdravili za topično uporabo. Rahlo pekoč občutek ob nanosu je lahko normalen in običajno izzven v nekaj sekundah po nanosu. V primeru močnega ali dlje časa trajajočega draženja prenehajte z uporabo in o tem obvestite zdravnika ali zdravstveno osebje. V primeru nenamerne zaužitja poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite etiketo. Shranjujte izven dosega otrok.

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca MOSS S.p.A. (moss@moss-info.it)

SHRANJEVANJE: - Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

 MOSS S.p.A. - Via all'Erno 5, 28040 Lesa (NO), ITALIJA, tel.: 0322.772032, faks: 0322.292733 - moss@moss-info.it - www.moss-brand.com

 0477 Datum zadnjega popravka navodil: Rev. 04 z dne 8. 9. 2017

	Za enkratno uporabo		Preberite navodila
	Rok uporabnosti		Shranjujte pri temperaturi do 25 °C
	Št. lota		Preberite navodila za uporabo
	Koda izdelka		Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža poškodovana