

## **NOVOX®GYNO- NAČIN UPORABE**

### **Postopek uporabe:**

- 1.** NOVOX®Gyno aplicirajte vsak drug dan (na 48 ur). Pakiranje 15 ml zadostuje za dve uporabi. Uporabite največ dve pakiranji.
- 2.** Pred nanosom sperite površino/vagino za vodo ali nevtralnimi milom.
- 3.** S priloženim aplikatorjem nanesite gel v vagino ali izven nje.
- 4.** Najbolje je, da NOVOX®Gyno uporabite zvečer pred spanjem, ali nekaj časa ostanete v ležečem položaju.

Shranjevanje pri temperaturi do 25°C. Pred uporabo je priporočljivo zaradi lažjega nanosa izdelek nekaj časa hraniti v hladilniku.

**Pred uporabo** natančno preberite navodilo! O tveganju in nezaželenih učinkih se **posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom**