

## **NOVOX®- NAČIN UPORABE**

### **Postopek uporabe:**

- 1.** Očistite rano in jo posušite.
- 2.** Nanesite na rano enakomerno, v debelini 2-3 milimetre in okoli rane 1-1,5 cm. 2 ml produkta zadošča za rano v velikosti 10X10 cm.
- 3.** Po nanosu Novox-a ® rano ali razjedo pokrijte s sterilno netkano gazo ali sterilnim zložencem.
- 4.** Aplicirati 2-3x/teden (na 48 do 72 ur – glede na potrebe bolnika), največ 30 dni, odvisno od zahtevnosti poškodbe.

Shranjevanje pri temperaturi do 25°C. Pred uporabo je priporočljivo zaradi lažjega nanosa izdelek nekaj časa hraniti v hladilniku.

**Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom**