

RelieX® - NAČIN UPORABE

Postopek uporabe:

RelieX® obloga se menja vsakih 48 ur.

RelieX® se lahko uporablja s kakršnimkoli modrčkom, ki je primeren za pooperativno obdobje v skladu z navodili osebnega zdravnika.

1. Pred nameščanjem blazinice si operite roke in očistite predel poškodbe po navodilih osebnega zdravnika.
2. Odprite embalažo z blazinico.
3. Previdno primite blazinico, pri tem pa pazite, da se z rokami ne dotaknete impregnirano notranjo stran, ki se bo dotikala rane.
4. Namestite blazinico na prsi.
5. Nadenite si modrček, pri tem pa pazite, da ostaneta blazinici na svojem mestu.
6. Nastavite naramnici modrčka tako, da se blazinici popolnoma prilegata ranam ali brazgotinam.

Izdelek shranjujte na suhem in hladnem mestu, ločeno od virov toplote, pri temperaturi do 25 °C. V primeru visoke zunanje temperature vam svetujemo shranjevanje izdelka v hladilniku (2-8 °C).

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

RelieX® se ne sme uporabljati v primeru preobčutljivosti ali predhodnega alergijskega odziva na sredstvo ali na njegove sestavine. Medicinski pripomoček **RelieX®** ni bil posebej preizkušen pri nosečnicah. Ker je pripomoček namenjen za lokalno uporabo, ki nima sistemskih učinkov, ni verjetno, da bi obstajale kontraindikacije za uporabo med nosečnostjo. Če ste ali sumite, da ste noseči, vam svetujemo, da se pred uporabo sredstva posvetujete z zdravnikom specialistom. Zaradi lastnosti delovanja ni verjetno, da bi obstajale kontraindikacije za uporabo med dojenjem. Vsekakor vam svetujemo, da se pred uporabo izdelka posvetujete z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.